

PROTOCOLLO CRIO-US LIPOLISI

I tipi di inestetismi possono essere tre:

- adipe (solitamente addome e fianchi)
- cellulite (solitamente glutei e interno cosce – femminile)
- mista

i tre inestetismi vanno trattati nel seguente modo:

- il freddo costante a -5 °C
- il manipolo va cambiato di zona ogni dieci min (per zona si intende ad esempio un fianco o un gluteo)
- l'ultrasuono varia da continuo a modulato nei seguenti modi a seconda del programma scelto

prodotti da utilizzare:

prima un liofilizzato o un fialoide ad effetto lipolitico su tutta la parte da trattare

durante il trattamento utilizzare un gel ad effetto lipolitico sotto l'ultrasuono

dopo l'applicazione del dispositivo concludere il trattamento con un connettivale manuale (con crema ad effetto lipolitico) o se possibile dieci minuti di massaggio con ultrasuono a manipolo o massaggio endodermico.

Piano sedute:

Si consigliano 8 sedute con il protocollo prima citato:

- 4 sedute distanziate di circa 3 gg tra una e l'altra
- 2 sedute distanziate di una settimana
- 2 sedute distanziate di 10 gg.

E' consigliabile un mantenimento di 1 o 2 volte al mese associata ad altri trattamenti.

Il risultato del piano di sedute può essere aumentato se si associa alla Crio-US-Lipolisi le seguenti tecnologie:

pressomassaggio, massaggio endodermico, ultrasuono con manipolo, radiofrequenza, elettrostimolazione, infrarosso.